










## GS 300 Светильник для общего обследования

Номер руководства 726202  
© Welch Allyn, 2017 г.

### Условные обозначения

-  См. прилагаемое руководство.
-  Осторожно! Светильник высокой интенсивности.
-  Использовать в помещении.
-  Питание вкл./откл.
-  Внимание
-  Осторожно
-  Ограничения по температуре
-  Ограничение влажности
-  Ограничение атмосферного давления

### Предупреждения и предостережения

**ВНИМАНИЕ!** Внимательно ознакомьтесь с инструкцией перед использованием данного продукта. Незнание рабочих требований для данного продукта может привести к травме для вас, пациента или к повреждению прибора.

**ВНИМАНИЕ!** Не используйте прибор вблизи воспламеняющихся обезболивающих средств или других воспламеняющихся веществ в сочетании с воздухом, средами, обогащенными кислородом или закисью азота: это может привести к взрыву.

**ВНИМАНИЕ!** Интенсивное освещение. Не смотрите прямо на работающий источник света. Это может нанести вред глазам. Для снижения риска повреждения глаз световым излучением не смотрите на яркие источники света и их отражения, защищайте глаза при аномальных размерах зрачков и отсутствии средств защиты от яркого света.

**ВНИМАНИЕ!** Используйте осветительный прибор на предусмотренном расстоянии в 50 см от объекта освещения. Использование на более близком расстоянии может причинить вред коже. Для снижения риска повреждения кожи световым излучением сократите интенсивность освещения на участке осмотра тканей, сократите время воздействия и примите дополнительные меры предосторожности, если чувствительность кожи изменилась вследствие повреждения тканей или использования обезболивающих средств.

**ВНИМАНИЕ!** Это продукт класса А. В больнице или кабинете врача этот продукт может вызвать радиопомехи, в случае которых пользователю следует принять соответствующие меры.

**ВНИМАНИЕ!** Не модифицируйте данный прибор. Любая модификация конструкции изделия может привести к травмированию пациента. Любая модификация прибора аннулирует гарантию на изделие.

### Предупреждения и предостережения (продолжение)

**ОСТОРОЖНО!** Изделие можно обслуживать только в авторизованных сервисных центрах Welch Allyn.

**ОСТОРОЖНО!** Прибор не содержит обслуживаемых или сменных частей.



**ОСТОРОЖНО!** Только Rx.

### Применение

Светильник Welch Allyn GS 300 предназначен для использования во врачебных кабинетах, больницах и специализированных кабинетах. Он не предназначен для постановки диагноза и проведения хирургических операций.

### Установка


#### Настольная или настенная

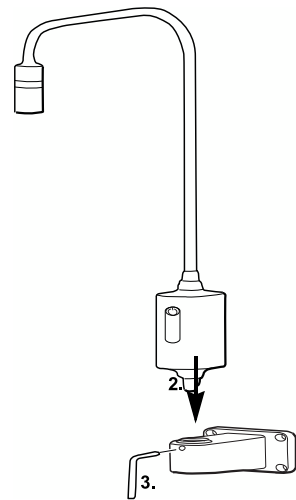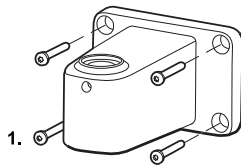


**ВНИМАНИЕ!** Убедитесь, что кронштейн прочно закреплен на стене или столе, передвижная подставка собрана надежно, а осветительная лампа надежно прикреплена к кронштейну или подставке согласно инструкции. Не вешайте и не кладите какие-либо предметы на прибор.

### Инструкции по установке

#### Инструкции по сборке передвижной подставки

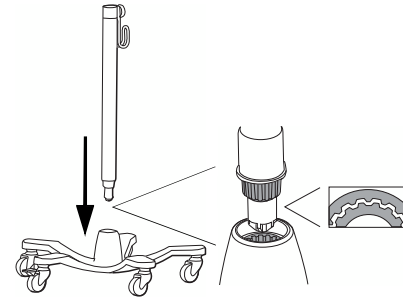

#### Установка

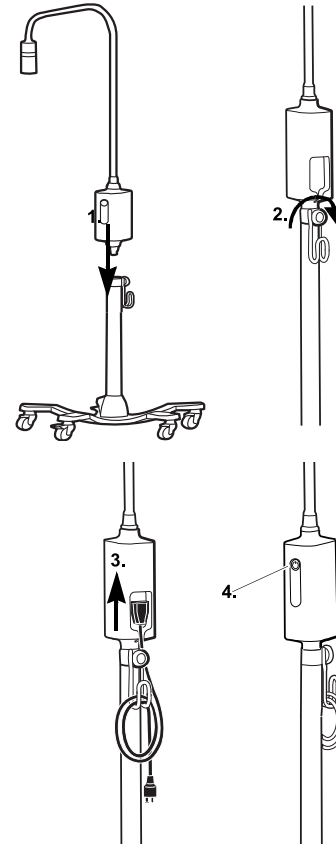

### Чистка

**ВНИМАНИЕ!** Убедитесь, что прибор отключен от электросети.

#### Светильник



Чистить влажной тканью с помощью теплой воды и неагрессивного моющего средства или одного из следующих растворов:

- 70-процентный раствор изопропилового спирта
- 10-процентный раствор неагрессивного отбеливателя

Протереть насухо чистой тканью.

### Устранение неисправностей

	Возможная причина	Решение
	Сбой электропитания. К светильнику не подается электропитание.	Проверить правильность подключения всех проводов.
	Светильник неисправен.	Обратиться в службу поддержки клиентов компании Welch Allyn.

### Гарантия

Два года.


### Технические характеристики

#### Электрика


Питание: 100–240 В ~ 50–60 Гц, макс. 0,35 А

#### Среда

Рабочая:

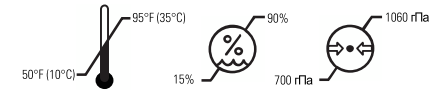

#### Транспортировка и хранение:

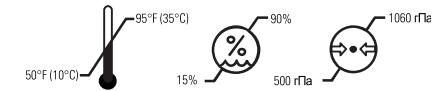

#### Классификация оборудования

Класс безопасности 1, для постоянной эксплуатации

**Дополнительные технические характеристики**  
[www.welchallyn.com/gsseries](http://www.welchallyn.com/gsseries)

#### Одобен

IEC 60601-1, UL 60601-1, IEC 60601-1-2, CAN/CSA C22.2 No 601.1-M90, AS/NZS3200



Welch Allyn Inc.  
4341 State Street Road  
Skaneateles Falls, NY 13153-0220 USA  
[www.welchallyn.com](http://www.welchallyn.com)



Представитель по вопросам нормативно-правового регулирования  
Welch Allyn Limited  
Navan Business Park  
Dublin Road  
Navan, County Meath Republic of Ireland

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Данный продукт соответствует действующим требуемым стандартам электромагнитных помех и не должен вызывать сбоев другого оборудования или подвергаться сбоям под воздействием других устройств. В качестве меры предосторожности не используйте данный прибор в непосредственной близости от другого оборудования.



[www.welchallyn.com/weee](http://www.welchallyn.com/weee)

Номер патента: US D621,981 S